

Chambre d'Inhalation nourrisson

Indication :

Aerochambre, une gamme complète de dispositif d'administration d'aérosols conçue spécifiquement pour chaque patient

Assurance d'inhalation maximale.

Caractéristiques :

Chambre antistatique : ne nécessite plus d'entretien particulier.

Masque ergonomique ConfortSeal sans latex : assure l'étanchéité

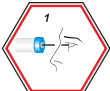
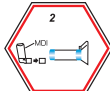
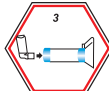


Indicateur Flow-vu : informe d'une bonne technique d'inhalation.

Valve d'inhalation à sens unique et à faible résistance : garantit la réactivité

Confort du patient : Valve d'exhalation EZ Flow : offre peu de résistance au flux d'air, particulièrement important

pour les jeunes enfants ayant un faible volume courant, dirige le flux loin du patient afin de prévenir l'irritation

Instruction d'utilisation

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4	Etape 5
1. Vérifiez des deux cotés qu'il n'y ait aucun objet pouvant gêner l'utilisation.	2. Retirez le bouchon de l'inhalateur et placez le connecteur du masque sur l'embouchure de la chambre d'inhalation jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent parfaitement.	3. Secouez bien l'inhalateur et l'insérer à l'emplacement prévu.	4. Placez fermement le masque sur le nez et la bouche, exhalez complètement, déclenchez l'inhalateur et commencez immédiatement à inhaler doucement puis retenez votre respiration pendant 8 à 10 secondes	5. Suivre les consignes du médecin ou de l'inhalateur pour savoir s'il faut répéter l'opération à plusieurs reprises et reprendre à partir de l'étape 3
				

Conseils :

- ◆ Utiliser sous prescription médicale
- ◆ Ne pas laisser à la portée d'un enfant seul
- ◆ Le dispositif n'est pas stérile
- ◆ A utiliser uniquement avec un inhalateur doseur
- ◆ Il est recommandé de remplacer le dispositif chaque année



Instructions de nettoyage

Nettoyez la chambre d'inhalation au moins une fois par semaine en suivant les instructions ci-dessous : (Ne pas nettoyer en utilisant de l'eau chaude, ceci endommagera la chambre d'inhalation)

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4	Etape 5	Etape 6
1. Retirer l'extrémité avec ouverture et le masque facial sans retirer les valves durant le nettoyage	2. Savonner toutes les parties pendant 15 min dans de l'eau tiède avec un détergent liquide et agiter doucement.	3. Rincer à l'eau claire	4. Secouer pour retirer l'excès d'eau sans frotter	5. Laisser sécher à l'air libre en position verticale	6. Remettre en place l'extrémité avec ouverture lorsque le dispositif est entièrement sec et prêt à l'emploi
